

## MEDLIQ

Pga. det øgede fokus på medicinforbruget i de danske stalde, markedsfører Big Dutchman (Skand.) A/S nu produktet **MEDLIQ** som giver en enestående mulighed for at medicinere dyrene mere specifikt.

Ved anvendelse af vådfodringsanlæg er vandmedicinering ikke særlig effektiv, da grisene optager den største mængde væske via foderet. En løsning er derfor at hælde medicinen i blandekarret hvilket er enkelt, men som har den uheldige følge, at mange raske dyr tildeles medicin med risiko for resistens til følge. Metoden er nem, men dyr pga. det store medicinforbrug.

### Virkemåde og anvendelse

Medliq er en medicindoserer specifikt udviklet til at dosere vandopløselig medicin og andre tilsætningsstoffer i forbindelse med vådfodringsanlæg.

Medliq består af en dockingstation med software og luftventil samt en doseringsbeholder. Dockingstationen monteres direkte på faldrøret, som fordeler foderet til en sti/dobbeltsti. Via et signal fra vådfodringsventilen registrerer softwaren uddoseringstiden over de sidste 24 timer og derfra bestemmes uddoseringsmængden automatisk.

Medicinen doseres automatisk under udfodring, hvilket sikrer en optimal opblanding i foderet.

Doseringsmetode og -mængder er udviklet i samarbejde med dyrlæger og princippet er, at medicinen fordeles på 3-4 udfodringer, hvilket giver bedst effekt af medicinen på en gruppe sygdomsramte dyr.

Medliq kan f.eks. sættes op ved en dobbeltsti i hver sektion, hvor de syge grise samles og en optimal / minimal medicinering muliggøres. Medliq kan desuden bruges i forbindelse med ESF-systemer, hvor bestemte søer skal have tildelt medicin, ormebehandling, vitamintilskud osv., som er irrelevante eller for dyre at tildele til hele flokken.

Der medfølger doseringsskemaer til de medicintyper, som typisk bruges til behandling af svinesygdomme. Dermed er det let for driftsleder/medarbejder at give den korrekte medicin til en gruppe dyr.

Kontakt os for nærmere information på tlf. 75 36 09 11



